

MODE D'EMPLOI


01 Ouvrir l'emballage extérieur.



**BOUCHON
D'ÉTANCHÉITÉ**

02 Oter le récipient secondaire étanche de l'emballage extérieur et l'ouvrir.

03 Enrouler individuellement les récipients primaires dans la bande de calage, l'absorbant ou la cartouchiere absorbante (option).

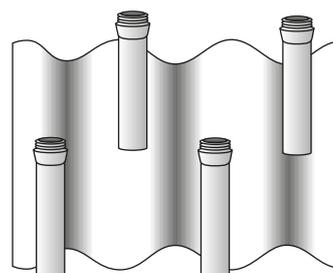

BANDE DE CALAGE

PRELEVEMENTS

04 Replacer ceux-ci dans le récipient secondaire sur le matériau absorbant.

05 Verrouiller fermement le bouchon du récipient secondaire.

06 Replacer celui-ci dans l'emballage extérieur.

07 Fermer l'emballage extérieur en rabattant les couvercles dans l'ordre de numérotation.



**RÉCIPIENT
SECONDAIRE
ÉTANCHE**



**EMBALLAGE
EXTÉRIEUR**



NOTA

Ne pas oublier de mentionner sur l'emballage extérieur le nom et téléphone de la personne à contacter en cas d'incident.

Dans la version 0,25 l de la gamme BIOTAINER, la bande de calage fait office d'absorbant.

IMPORTANT

- L'ensemble des éléments de marquage à apposer obligatoirement sur l'emballage tertiaire sont présentés sur le couvercle du carton (rabat n°1).
- L'emballage BIOTAINER doit être utilisé dans les conditions prévues par les réglementations en vigueur, et conformément aux certifications dont il a fait l'objet.
- En cas de stérilisation par la technique d'autoclavage, changer le joint d'étanchéité du récipient secondaire avant la réutilisation de l'emballage secondaire.

NE JAMAIS METTRE DE GLACE SÈCHE DANS LE RÉCIPIENT SECONDAIRE ÉTANCHE.